

## **Program za štampanje DICOM slika izs foldera ili sa donetog medijuma**

Program je funkcionalan 15 dana. Nakon toga za dalje korišćenje se mora registrovati.

Kontakt mail: digitalixdx@gmail.com

Program je podesan za sve vrste DICOM viewer programa koji imaju mogućnost exporta karakterističnih Dicom slika u željeni folder ili sa donetog medijuma

Preporučljivo je da prvo izdvojite pšotrebnu seriju karakterističnih slika, tokom pregleda. Slike se učitavaju automatski otvaranjem tog foldera.

Opšti parametri potrebni za komunikaciju sa štampačem, lokacija foldera sa slikama, broj podela na filmu se unose u ini fajlu uz program.

Sam program ima nekoliko grupisanih segmenata funkcija koje su lako shvatljive.

Moguće je učitati čitavu studiju ali će to biti jako dugo i nepotreban trošak. Na dnu postoji progres bar gde možete pratiti tok učitavanja kao menjanjem broja strana... Program uvek možete nasilno prekinuti pa ponoviti učitavanje.

Sa leve strane odozgo na dole su dugmići sa određenim funkcijama na željenom filmu. Određena slika u gridu se selektuje levim klikom na nju i dobija zeleni okvir. Onda se primenjuju određene funkcije nad tom slikom.

Deselektovanje neke birane funkcije se vrši desnim klikom miša čime pokazivač postaje opet strelica.

Moguće je izvršiti selekciju više slika u gridi držanjem stisnuto tastera CTRL na tastaturi i klikom na sklike u gridu. Izaberite željeni alat i efekat će biti primenjen na sve slike

Zavisno od broja učitanih slika možete imati više filmova PAGE1/2. Nexte Page prikazuje sledeću, a Prior Page prethodnu stranu. Svaka strana se može posebno podešavati u odnosu na broj slika.

To se bira klikom na polje Grid. Otvaraju se kvadratići. Stisni levim tasterom miša i kreći se po podeli za povećanje potrebnog broja slika ili selektuj 2x2 kvadratića za 4 slike.

Ako pritisnete razmaknicu na tasturi dobićete meni sa dodatnim alatima koji vam mogu biti interesantni.

Tu se nalazi opcija štampa na papiru - lokalni štampač ili snimate kao pdf fajl.

Više informacija na telefon: (+381) 64 640 8812 e-Mail: digitalixdx@gmail.com